

Algo muy importante para obtener buenos resultados es lograr siempre niveles adecuados de temperatura en el área de tratamiento. Es por eso que el sistema RF Premium integra en su pieza de mano CET Monopolar un termómetro infrarrojo que mide en tiempo real y de forma continua la temperatura en la piel. Esto permitirá ajustar la temperatura deseada en el equipo manteniéndola de forma constante y automática.



SEGURO

- Equipado con control de temperatura y ajuste de potencia automático.
- Certificado EMC - CEM Compatibilidad Electro Magnética para dispositivos médicos.
- Terapeuta libre de exposición a radiación electro magnética.
- No interfiere, ni es interferida por otros equipos electrónicos que trabajan en su proximidad.
- No da chispazos.



CE
0120

BELIUM[®]
M E D I C A L

Sello:

Pásate a **RF PREMIUM**

www.belium.es

info@belium.es

985 30 12 34

©BELIUM es una marca registrada

BELIUM[®]
M E D I C A L

RF PREMIUM

La más avanzada tecnología para el cuidado y bienestar.

Radiofrecuencia/hipertermia equipada con sistema resistivo, capacitivo, multipolar y control automático de temperatura.



1


Su paciente disfrutará sin duda, pues se trata de un tratamiento confortable y relajante, además de que obtendrá excelentes resultados desde la primera sesión.

VERSATIL Y POTENTE

- 350W CET
- 250W RET
- Dos frecuencias disponibles 300 KHz y 500 KHz
- Dos modalidades de transmisión:


CET

(Transmisión Eléctrica Capacitiva)

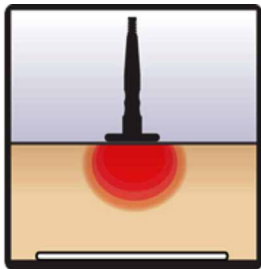

RET

(Transmisión Eléctrica Resistiva)

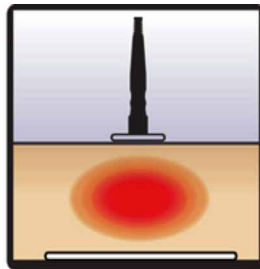**2**

El equipo permite seleccionar modo constante **AUTOMATICO y MANUAL.**

Sin embargo también es posible seleccionar los **MODOS del 1 - 4** en función **MANUAL** para poder aplicar más energía, y conseguir mejores resultados en algunos tratamientos.

Modo de emisión continuo + 4 modos pulsados

Función	Método	Modo	Intervalo
AUTOMÁTICO -Modo temperatura (La intensidad es automática la temperatura se puede ajustar)	Sólo CET	MODE Cont.	La energía se emite continua
MANUAL -Pulsar modo (La temperatura no se indica en la pantalla)	Ambos CET/RET	MODE Cont.	La energía se emite continua
		MODE 1	La energía se emite 0,7" y 0,3" en reposo.
		MODE 2	La energía se emite 0,5" y 0,5" en reposo.
		MODE 3	La energía se emite 0,4" y 0,6" en reposo.
		MODE 4	La energía se emite 0,3" y 0,7" en reposo.

3

Nunca hubiera pensado en un equipo de Radiofrecuencia tan completo

El equipo **RF Premium** representa los mayores avances en la aplicación de la tecnología de Radiofrecuencia para fines terapéuticos. Estas son algunas de las patologías que puede tratar el terapeuta con la tecnología RF Premium:

- Dolores musculares
- Artritis reumática
- Artrosis
- Traumas, contusiones y esguinces.
- Edema y hematomas.
- Tratamiento de heridas quirúrgicas.
- Rehabilitación postoperatoria.
- Fracturas y luxaciones.
- Tendinitis, esguinces y torceduras.
- Fibromialgia.
- Contracturas.
- Optimiza los tiempos de recuperación en lesiones y procesos postoperatorios.
- Mejora la nutrición, oxigenación y regula el potencial de la membrana celular.
- Compatible con terapia manual (estiramientos masaje, cinesiterapia pasiva o activa).
- Se puede aplicar sobre prótesis metálicas.