

GUÍA DE TRATAMIENTO



Feels More Beautiful Than Ever

Bien benido a la guía de tratamientos de JetCare.

La gama cosmetica de soluciones de Jetpeel's esta renovada, con una formula mejorada e innovadora que de esta forma consigue las cualidades cosmeticas más altas. En especial el JetPeel`s con su unica pieza de mano patentada para la infusión directa del producto sobre la piel por su dispositivo de presión y energía.

Las concentraciones estan diseñadas para conseguir un efecto más optimo de tratamiento para todo tipo de pieles, zonas del cuerpon y preocupaciones de los clientes.

JetPeel tiene esta nueva y mejorada linea de JetCare soluciones, para que los clientes despues de varios meses puedan comprobar que esta la line más compatible con su piel, junto con la precisión de la pieza de mano JetPeel para el efecto más optimo.

Desarrollado unicamente por JetPeel en conjunto con un laboratorio lider en formulación de cosmetica, los productos JetCare bridan tratamientos JetPeel intensamente efectivos en las clinicas, spa, clinicas esteticas; ademas de ser las unicas autorizas y aprobas por JetPeel para su uso con las piezas de mano.

Junto con estos avances, JetPeel de TavTech ha adaptado las pautas de tratamiento a su línea exclusiva de soluciones JetCare para obtener los mejores resultados del tratamiento y la satisfacción del cliente.

JetCare de TavTech es la primera opción de los cosmetólogos y especialistas de todo el mundo, además de la única opción para la mejor experiencia de tratamiento con JetPeel.

Con las fórmulas y pautas de tratamiento de JetCare, la piel se siente más suave, luminosa y reparada.

CONTENIDO


JetPeel secuencia de tratamiento.....	4
Piel.....	6-35
Caracteristicas de la piel.....	6
Tratamientos antienvjecimiento según las características de la piel.....	8
Tratamientos para la pérdida de tono y arrugas según las características de la piel.....	10
Tratamientos para el acné según las características de la piel.....	12
Tratamientos post-acné según las características de la piel.....	14
Tratamientos para la cuperosis y la piel sensible según las características de la piel	16
Tratamientos despigmentantes según las características de la piel.....	18
Pautas para el tratamiento de la piel.....	20
Cuero cabelludo y el cabello	36-43
Características del cuero cabelludo y el cabello.....	37
Guía de tratamiento.....	38

Secuencia de tratamiento

STEP
01

MASAJE LINFATICO


Masaje desintoxicante y entimulador de la microcirculación

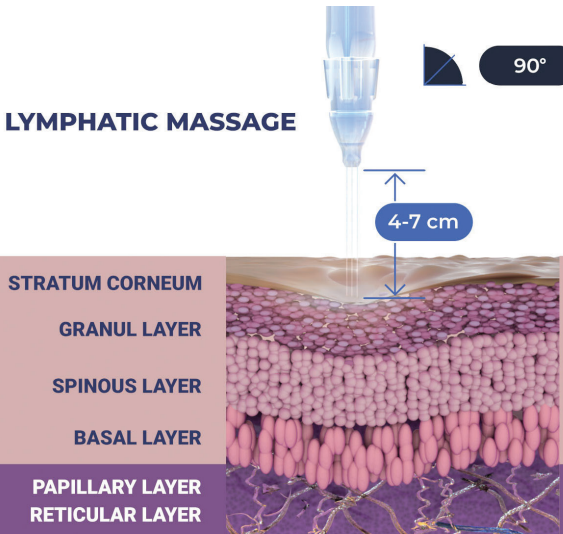

STEP
02

EXFOLIACION


Prepara la piel para recibir la hidratación de la siguiente infusión del tratamiento.

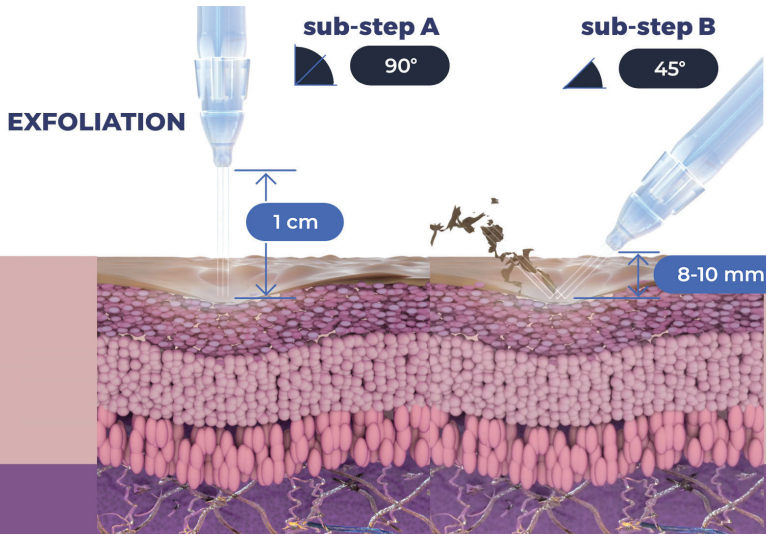

STEP
03

INFUSION


Penetración profunda y efectiva de los ingredientes activos a la piel.

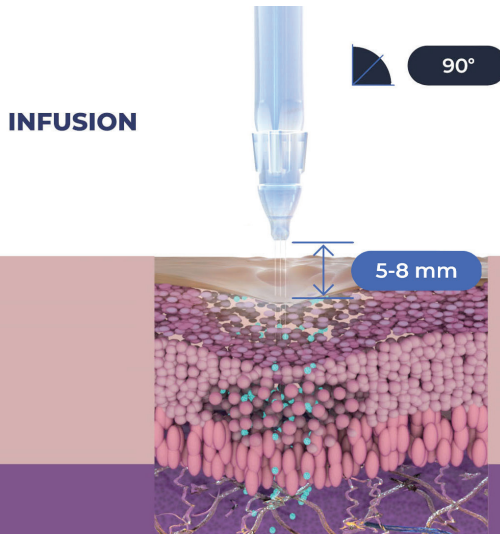

STEP
04

BOOSTER INFUSION

Post-infusión para un resultado potenciado del tratamiento.

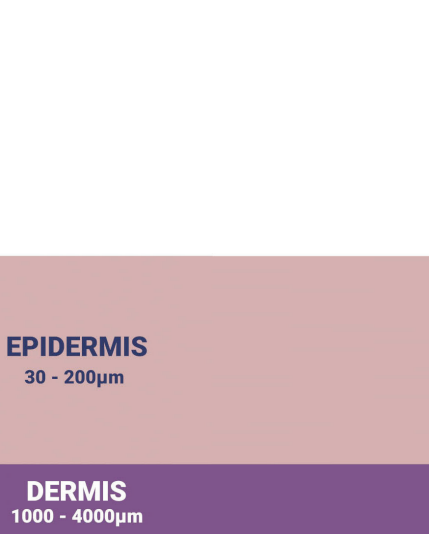



PIEL

Recomendación de ciclo de tratamiento



Los primeros 6 tratamientos:

1-2 por semana durante 3 a 6 semanas



Despues de 6 tratamientos:

Mantenimiento de tratamientos cada 3-4 semanas.

Características de la piel

El envejecimiento de la piel ocurre cuando pierde la habilidad de retener su brillo natural, será lo que condicione el proceso natural del envejecimiento además de las condiciones ambientales adversas como la contaminación y la exposición al sol. Esto conduce a la destrucción de la producción de colágeno, elastina y sebo, además de incrementar el riesgo de la deshidratación, hiperpigmentaciones, puntos negros y la apariencia

Piel Normal

La piel normal, que no está ni deshidratada ni con exceso de grasa:

- No presenta imperfecciones.
- No presenta sensibilidad.
- Poros no visibles.

Piel Grasa

- Poros visibles
- Tez opaca o brillante y gruesa
- Puntos negros, granos u otras imperfecciones

Piel seca

- Poros no visibles
- Piel opaca y aspera.
- Rojeces
- Poca elasticidad
- Más líneas de expresión

Piel sensible

- Rojeces
- Picor
- Asperidad
- Sequedad

Combinación de tipos de piel

La piel puede ser normal en ciertas zonas del rostro pero presentar grasa en otras con la zona T (nariz, frente y barbilla). Mucha gente presenta este tipo de piel por lo que habría que ajustar el tratamiento para estas diferentes áreas

La combinación de piel puede tener:

- Poros más dilatados en ciertas zonas.
- Puntos negros.
- Brillos.

Tratamiento Anti-Aging según las características de la piel

ANTI-AGING - Piel joven

TIPO DE PIEL	1 Tratamiento	2 Tratamiento	3 Tratamiento
Normal	Guía de tratamiento 4 con JetCare Boost Glow	Guía de tratamiento 13 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 4 con JetCare Boost Tight
Seca	Guía de tratamiento 4 con JetCare Boost Glow	Treatment Guideline 13 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 1 con JetCare Boost Tight
Grasa	Guía de tratamiento 4 con JetCare Boost Glow	Guía de tratamiento 14 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 1 con JetCare Boost Tight
Sensible	Guía de tratamiento 4 con JetCare Boost Glow	Guía de tratamiento 13 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 1 con JetCare Boost Tight

4 Tratamiento	5 Tratamiento	6 Tratamiento	Mantenimiento del tratamiento (cada3-4 semanas)
Guía de tratamiento 16 con JetCare Boost Hydrate	Guía de tratamiento 8 con JetCare Boost Glow	Guía de tratamiento 9 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 1 con JetCare Boost Tight
Guía de tratamiento 16 con JetCare Boost Hydrate	Guía de tratamiento 8 con JetCare Boost Glow	Guía de tratamiento 29 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 1 con JetCare Boost Tight
Guía de tratamiento 14 con JetCare Boost Hydrate	Guía de tratamiento 6 con JetCare Boost Glow	Guía de tratamiento 10 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 2 con JetCare Boost Tight
Guía de tratamiento 16 con JetCare Boost Hydrate	Guía de tratamiento 8 con JetCare Boost Glow	Guía de tratamiento 29 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 1 con JetCare Boost Tight

ANTI-AGING – Piel Madura

TIPO DE PIEL	1Tratamiento	2Tratamiento	3Tratamiento
Normal	Guía de tratamiento 4 con JetCare Boost Glow	Guía de tratamiento 15 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 1 con JetCare Boost Tight
Seca	Guía de tratamiento 4 con JetCare Boost Glow	Guía de tratamiento 14 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 1 con JetCare Boost Tight
Grasa	Guía de tratamiento 2 con JetCare Boost Glow	Guía de tratamiento 15 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 2 con JetCare Boost Tight
Sensible	Guía de tratamiento 4 con JetCare Boost Glow	Guía de tratamiento 14 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 1 con JetCare Boost Tight

4Tratamiento	5Tratamiento	6Tratamiento	Mantenimiento del tratamiento (cada3-4 semanas)
Guía de tratamiento 10 con JetCare Boost Hydrate	Guía de tratamiento 29 con JetCare Boost Glow	Guía de tratamiento 6 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 2 con JetCare Boost Tight
Guía de tratamiento 18 con Boost Wide Range HA	Guía de tratamiento 29 con JetCare Boost Glow	Guía de tratamiento 6 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 1 con JetCare Boost Tight
Guía de tratamiento 10 con JetCare Boost Hydrate	Guía de tratamiento 29 con JetCare Boost Glow	Guía de tratamiento 7 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 2 con JetCare Boost Tight
Guía de tratamiento 17 Boost con Wide Range HA	Guía de tratamiento 29 con JetCare Boost Glow	Guía de tratamiento 8 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 1 con JetCare Boost Tight



Tratamientos para la pérdida de tono y arrugas según las características de la piel

Pérdida de tono y arrugas - Piel joven

TIPO DE PIEL	1Tratamiento	2Tratamiento	3Tratamiento
Normal	Guía de tratamiento 4 con JetCare Boost Tight	Guía de tratamiento 17 Boost con Wide Range HA	Guía de tratamiento 4 con JetCare Boost Regenerate
Seca	Guía de tratamiento 4 con JetCare Boost Tight	Guía de tratamiento 17 Boost con Wide Range HA	Guía de tratamiento 1 con JetCare Boost Regenerate
Grasa	Guía de tratamiento 1 con JetCare Boost Tight	Guía de tratamiento 17 Boost con Wide Range HA	Guía de tratamiento 2 con JetCare Boost Regenerate
Sensible	Guía de tratamiento 4 con JetCare Boost Tight	Guía de tratamiento 17 Boost con Wide Range HA	Guía de tratamiento 1 con JetCare Boost Regenerate

4Tratamiento	5Tratamiento	6Tratamiento	Mantenimiento del tratamiento (cada3-4 semanas)
Guía de tratamiento 5 con JetCare Boost Glow	Guía de tratamiento 17 Boost con Wide Range HA	Guía de tratamiento 12 con JetCare Boost Hydrate	Guía de tratamiento 17 Boost con Wide Range HA
Guía de tratamiento 8 con JetCare Boost Glow	Guía de tratamiento 17 Boost con Wide Range HA	Guía de tratamiento 17 Boost con Wide Range HA	Guía de tratamiento 17 Boost con Wide Range HA
Guía de tratamiento 6 con JetCare Boost Glow	Guía de tratamiento 18 Boost con Wide Range HA	Guía de tratamiento 12 con JetCare Boost Hydrate	Guía de tratamiento 18 Boost con Wide Range HA
Guía de tratamiento 8 con JetCare Boost Glow	Guía de tratamiento 20 Boost con Wide Range HA	Guía de tratamiento 17 Boost con Wide Range HA	Guía de tratamiento 17 Boost con Wide Range HA

Pérdida de tono y arrugas – Piel Madura

TIPO DE PIEL	1Tratamiento	2Tratamiento	3Tratamiento
Normal	Guía de tratamiento 2 con JetCare Boost Tight	Guía de tratamiento 19 Boost con Wide Range HA	Guía de tratamiento 6 con JetCare Boost Regenerate
Seca	Guía de tratamiento 1 con JetCare Boost Tight	Guía de tratamiento 18Boost con Wide Range HA	Guía de tratamiento 5 con JetCare Boost Regenerate
Grasa	Guía de tratamiento 2 con JetCare Boost Tight	Guía de tratamiento 19 Boost con Wide Range HA	Guía de tratamiento 7 con JetCare Boost Regenerate
Sensible	Guía de tratamiento 4 con JetCare Boost Tight	Guía de tratamiento 17 Boost con Wide Range HA	Guía de tratamiento 5 con JetCare Boost Regenerate

4Tratamiento	5Tratamiento	6Tratamiento	Mantenimiento del tratamiento (cada3-4 semanas)
Guía de tratamiento 19 Boost con Wide Range HA	Guía de tratamiento 29 con JetCare Boost Glow	Guía de tratamiento 10 con JetCare Boost Hydrate	Guía de tratamiento 18 Boost con Wide Range HA
Guía de tratamiento 18 Boost con Wide Range HA	Guía de tratamiento 29 con JetCare Boost Glow	Guía de tratamiento 17 Boost con Wide Range HA	Guía de tratamiento 17 Boost con Wide Range HA
Guía de tratamiento 19 Boost con Wide Range HA	Guía de tratamiento 29 con JetCare Boost Glow	Guía de tratamiento 11 con JetCare Boost Hydrate	Guía de tratamiento 19 Boost con Wide Range HA
Guía de tratamiento 17 Boost con Wide Range HA	Guía de tratamiento 29 con JetCare Boost Glow	Guía de tratamiento 17 Boost con Wide Range HA	Guía de tratamiento 17 Boost con Wide Range HA

Tratamientos para el acne según las características de la piel

ACNE - Piel joven

TIPO DE PIEL	1Tratamiento	2Tratamiento	3Tratamiento
Normal	Guía de tratamiento 28 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 25 con JetCare Boost Glow	Guía de tratamiento 4 con JetCare Boost Tight
Seca	Guía de tratamiento 28 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 25 con JetCare Boost Glow	Guía de tratamiento 4 con JetCare Boost Tight
Grasa	Guía de tratamiento 28 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 25 con JetCare Boost Glow	Guía de tratamiento 1 con JetCare Boost Tight
Sensible	Guía de tratamiento 28 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 25 con JetCare Boost Glow	Guía de tratamiento 4 con JetCare Boost Tight

4Tratamiento	5Tratamiento	6Tratamiento	Mantenimiento del tratamiento (cada3-4 semanas)
Guía de tratamiento 16 con JetCare Boost Hydrate	Guía de tratamiento 28 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 29 con JetCare Boost Tight	Guía de tratamiento 28 con JetCare Boost Hydrate
Guía de tratamiento 16 con JetCare Boost Hydrate	Guía de tratamiento 28 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 32 con JetCare Boost Tight	Guía de tratamiento 25 con JetCare Boost Hydrate
Guía de tratamiento 14 con JetCare Boost Hydrate	Guía de tratamiento 28 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 29 con JetCare Boost Tight	Guía de tratamiento 25 con JetCare Boost Hydrate
Guía de tratamiento 16 con JetCare Boost Hydrate	Guía de tratamiento 28 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 32 con JetCare Boost Tight	Guía de tratamiento 28 con JetCare Boost Hydrate

ACNE – Piel Madura

TIPO DE PIEL	1Tratamiento	2Tratamiento	3Tratamiento
Normal	Guía de tratamiento 28 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 26 con JetCare Boost Glow	Guía de tratamiento 1 con JetCare Boost Tight
Grasa	Guía de tratamiento 28 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 27 con JetCare Boost Glow	Guía de tratamiento 2 con JetCare Boost Tight
Sensible	Guía de tratamiento 28 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 25 con JetCare Boost Glow	Guía de tratamiento 1 con JetCare Boost Tight

4Tratamiento	5Tratamiento	6Tratamiento	Mantenimiento del tratamiento (cada3-4 semanas)
Guía de tratamiento 14 con JetCare Boost Hydrate	Guía de tratamiento 28 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento30 con JetCare Boost Tight	Guía de tratamiento26 con JetCare Boost Hydrate
Guía de tratamiento 14 con JetCare Boost Hydrate	Guía de tratamiento 28 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 31 con JetCare Boost Tight	Guía de tratamiento 27 con JetCare Boost Hydrate
Guía de tratamiento 14 con JetCare Boost Hydrate	Guía de tratamiento 28 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 29 con JetCare Boost Tight	Guía de tratamiento 25 con JetCare Boost Hydrate

Tratamientos Post-acne según las características de la piel

POST-ACNE - Piel joven

TIPO DE PIEL	1Tratamiento	2Tratamiento	3Tratamiento
Normal	Guía de tratamiento 1 con JetCare Boost Tight	Guía de tratamiento 14 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 18 Boost con Wide Range HA
Seca	Guía de tratamiento 1 con JetCare Boost Tight	Guía de tratamiento 13 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 18 Boost con Wide Range HA
Grasa	Guía de tratamiento 1 con JetCare Boost Tight	Guía de tratamiento 14 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 18 Boost con Wide Range HA
Sensible	Guía de tratamiento 1 con JetCare Boost Tight	Guía de tratamiento 13 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 17 Boost con Wide Range HA

4Tratamiento	5Tratamiento	6Tratamiento	Mantenimiento del tratamiento (cada3-4 semanas)
Guía de tratamiento 8 con JetCare Boost Glow	Guía de tratamiento 12 con JetCare Boost Hydrate	Guía de tratamiento 30 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 18 Boost con Wide Range HA
Guía de tratamiento 8 con JetCare Boost Glow	Guía de tratamiento 18 Boost con Wide Range HA	Guía de tratamiento 29 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 18 Boost con Wide Range HA
Guía de tratamiento 8 con JetCare Boost Glow	Guía de tratamiento 12 con JetCare Boost Hydrate	Guía de tratamiento 30 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 18 Boost con Wide Range HA
Guía de tratamiento 8 con JetCare Boost Glow	Guía de tratamiento 17 Boost con Wide Range HA	Guía de tratamiento 29 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 17 Boost con Wide Range HA

POST-ACNE – Piel Madura

TIPO DE PIEL	1Tratamiento	2Tratamiento	3Tratamiento
Normal	Guía de tratamiento 1 con JetCare Boost Tight	Guía de tratamiento 14 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 18 Boost con Wide Range HA
Seca	Treatment Guideline 1 with JetCare Boost Tight	Guía de tratamiento 14 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 17 Boost con Wide Range HA
Grasa	Treatment Guideline 2 with JetCare Boost Tight	Guía de tratamiento 14 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 19 Boost con Wide Range HA
Sensible	Guía de tratamiento 1 con JetCare Boost Tight	Guía de tratamiento 14 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 17 Boost con Wide Range HA

4Tratamiento	5Tratamiento	6Tratamiento	Mantenimiento del tratamiento (cada3-4 semanas)
Guía de tratamiento 8 con JetCare Boost Glow	Guía de tratamiento 12 con JetCare Boost Hydrate	Guía de tratamiento 30 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 18 Boost con Wide Range HA
Guía de tratamiento 8 con JetCare Boost Glow	Guía de tratamiento 17 Boost con Wide Range HA	Guía de tratamiento 30 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 17 Boost con Wide Range HA
Guía de tratamiento 8 con JetCare Boost Glow	Guía de tratamiento 9 con JetCare Boost Hydrate	Guía de tratamiento 30 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 19 Boost con Wide Range HA
Guía de tratamiento 8 con JetCare Boost Glow	Guía de tratamiento 17 Boost con Wide Range HA	Guía de tratamiento 30 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 17 Boost con Wide Range HA



Tratamientos para la cuperosis y piel sensible según las características de la piel

cuperosis y piel sensible - Piel joven

TIPO DE PIEL	1Tratamiento	2Tratamiento	3Tratamiento
Normal	Guía de tratamiento 24 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 21 con JetCare Boost Tight	Guía de tratamiento 1 con JetCare Boost Glow
Seca	Guía de tratamiento 24 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 21 con JetCare Boost Tight	Guía de tratamiento 1 con JetCare Boost Glow
Grasa	Guía de tratamiento 24 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 21 con JetCare Boost Tight	Guía de tratamiento 1 con JetCare Boost Glow
Sensible	Guía de tratamiento 24 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 21 con JetCare Boost Tight	Guía de tratamiento 4 con JetCare Boost Glow

4Tratamiento	5Tratamiento	6Tratamiento	Mantenimiento del tratamiento (cada3-4 semanas)
Guía de tratamiento 16 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 8 con JetCare Boost Hydrate	Guía de tratamiento 9 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 21 con JetCare Boost Hydrate
Guía de tratamiento 16 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 8 con JetCare Boost Hydrate	Guía de tratamiento 29 con JetCare Boost Hydrate	Guía de tratamiento 21 con JetCare Boost Hydrate
Guía de tratamiento 14 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 8 con JetCare Boost Hydrate	Guía de tratamiento 9 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 21 con JetCare Boost Hydrate
Guía de tratamiento 16 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 8 con JetCare Boost Hydrate	Guía de tratamiento 29 con JetCare Boost Hydrate	Guía de tratamiento 21 con JetCare Boost Hydrate

cuperosis y piel sensible –Piel Madura

TIPO DE PIEL	1Tratamiento	2Tratamiento	3Tratamiento
Normal	Guía de tratamiento 21 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 22 con JetCare Boost Tight	Guía de tratamiento 1 con JetCare Boost Glow
Seca	Guía de tratamiento 24 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 21 con JetCare Boost Tight	Guía de tratamiento 1 con JetCare Boost Glow
Grasa	Guía de tratamiento 22 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento23 con JetCare Boost Tight	Guía de tratamiento 2 con JetCare Boost Glow
Sensible	Guía de tratamiento 24 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 21 con JetCare Boost Tight	Guía de tratamiento 1 con JetCare Boost Glow

4Tratamiento	5Tratamiento	6Tratamiento	Mantenimiento del tratamiento (cada3-4 semanas)
Guía de tratamiento 14 with JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 29 con JetCare Boost Hydrate	Guía de tratamiento 9 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 21 con JetCare Boost Hydrate
Guía de tratamiento 14 with JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 29 con JetCare Boost Hydrate	Guía de tratamiento 24 con JetCare Boost Glow	Guía de tratamiento 21 con JetCare Boost Hydrate
Guía de tratamiento 14 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 29 con JetCare Boost Hydrate	Guía de tratamiento 11 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 21 con JetCare Boost Hydrate
Guía de tratamiento 13 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 29 con JetCare Boost Hydrate	Guía de tratamiento 24 con JetCare Boost Glow	Guía de tratamiento 21 con JetCare Boost Hydrate



Tratamientos para la luminosidad y pigmetación según las características de la piel

luminosidad y pigmetación - Piel joven

TIPO DE PIEL	1Tratamiento	2Tratamiento	3Tratamiento
Normal	Guía de tratamiento 16 con JetCare Boost Hydrate	Guía de tratamiento 13 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 1 con JetCare Boost Tight
Seca	Guía de tratamiento 16 con JetCare Boost Hydrate	Guía de tratamiento 13 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 4 con JetCare Boost Tight
Grasa	Guía de tratamiento 16 con JetCare Boost Hydrate	Guía de tratamiento 14 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 1 con JetCare Boost Tight
Sensible	Guía de tratamiento 16 con JetCare Boost Hydrate	Guía de tratamiento 13 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 4 con JetCare Boost Tight

4Tratamiento	5Tratamiento	6Tratamiento	Mantenimiento del tratamiento (cada3-4 semanas)
Guía de tratamiento 16 con JetCare Boost Hydrate	Guía de tratamiento 8 con JetCare Boost Glow	Guía de tratamiento 9 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 13 with JetCare Boost Hydrate
Guía de tratamiento 16 con JetCare Boost Hydrate	Guía de tratamiento 8 con JetCare Boost Glow	Guía de tratamiento 13 con JetCare Boost Hydrate	Guía de tratamiento 13 con JetCare Boost Hydrate
Guía de tratamiento 14 con JetCare Boost Hydrate	Guía de tratamiento 8 con JetCare Boost Glow	Guía de tratamiento 10 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 14 con JetCare Boost Hydrate
Guía de tratamiento 16 con JetCare Boost Hydrate	Guía de tratamiento 8 con JetCare Boost Glow	Guía de tratamiento 13 con JetCare Boost Hydrate	Guía de tratamiento 13 con JetCare Boost Hydrate

luminosidad y pigmetación – Piel Madura

TIPO DE PIEL	1Tratamiento	2Tratamiento	3Tratamiento
Normal	Guía de tratamiento 13 con JetCare Boost Hydrate	Guía de tratamiento 14 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 3 con JetCare Boost Tight
Seca	Guía de tratamiento 16 con JetCare Boost Hydrate	Guía de tratamiento 14 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 1 con JetCare Boost Tight
Grasa	Guía de tratamiento 14 con JetCare Boost Hydrate	Guía de tratamiento 15 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 2 con JetCare Boost Tight
Sensible	Guía de tratamiento 16 con JetCare Boost Hydrate	Guía de tratamiento 13 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 1 con JetCare Boost Tight

4Tratamiento	5Tratamiento	6Tratamiento	Mantenimiento del tratamiento (cada3-4 semanas)
Guía de tratamiento 14 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 29 con JetCare Boost Hydrate	Guía de tratamiento 10 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 14 con JetCare Boost Hydrate
Guía de tratamiento 14 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 29 con JetCare Boost Hydrate	Guía de tratamiento 14 con JetCare Boost Hydrate	Guía de tratamiento 14 con JetCare Boost Hydrate
Guía de tratamiento 14 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 31 con JetCare Boost Hydrate	Guía de tratamiento 14 con JetCare Boost Hydrate	Guía de tratamiento 15 con JetCare Boost Hydrate
Guía de tratamiento 13 con JetCare Boost Regenerate	Guía de tratamiento 29 con JetCare Boost Hydrate	Guía de tratamiento 13 con JetCare Boost Hydrate	Guía de tratamiento 13 con JetCare Boost Hydrate

Guía de Tratamiento. 1

Indicaciones: Anti-Aging
Pérdida de firmeza y arrugas Acne
Post-Acne Cuperosis & Piel sensible
Despigmentante

Acido Glicolico 5% + Acido Hialuronico con diferentes pesos moleculares

	MASAJE LINFATICO	STEP 01	EXFOLIACION	STEP 02	INFUSION	STEP 03	BOOSTER INFUSION	STEP 04
 Pieza de mano	TripleJet		TripleJet		TripleJet o SingleJet Narrow		TripleJet o SingleJet Narrow	
 Distancia de la piel	4-7 cm		1 cm		0.5-0.8 cm		0.5-0.8 cm	
 Angulo pieza de mano	90°		90°		90°		90°	
 Tiempo	10-15 min		5-7 min		5-7 min		5-7 min	
 Usar	~18ml de JetCareHydro		~5ml de Renewal CareGlycolic Acid 5%		~5ml de Anti-Aging Care Wide Range Hyaluronic Acid		~3ml de JetCare Boost: Tight/ Regenerate/Glow	
 Comentarios			Dejar actuar sobre la piel de 5 a 8 minutos. Luego, lavar con 8 ml de JetCare Hydro. Pieza de mano TripleJet a 45-60°.				Según los tratamientos según las características de la piel	

Guía de Tratamiento. 2

Indicaciones: Anti-Aging
Pérdida de firmeza y arrugas Acne
Post-Acne Cuperosis & Piel sensible
Despigmentante

Acido Glicolico 10% +Acido Hialuronico con diferentes pesos moleculares

	MASAJE LINFATICO	STEP 01	EXFOLIACION	STEP 02	INFUSION	STEP 03	BOOSTER INFUSION	STEP 04
 Pieza de mano	TripleJet		TripleJet		TripleJet o SingleJet Narrow		TripleJet or SingleJet Narrow	
 Distancia de la piel	4-7 cm		1 cm		0.5-0.8 cm		0.5-0.8 cm	
 Angulo pieza de mano	90°		90°		90°		90°	
 Tiempo	10-15 min		5-7 min		5-7 min		5-7 min	
 Usar	~18ml de JetCareHydro		~5ml de Renewal CareGlycolic Acid 10%		~5ml de Anti-Aging Care Wide Range Hyaluronic Acid		~3ml de JetCare Boost: Tight/ Regenerate/Glow	
 Comentarios			Dejar actuar sobre la piel de 5 a 8 minutos. Luego, lavar con 8 ml de JetCare Hydro. Pieza de mano TripleJet a 45-60°.				As peSegún los tratamientos según las características de la piel	

Guía de Tratamiento. 3

Indicaciones: Luminosidad y despigmentación

Acido Glicolico 16% + Acido Hialuronico con diferentes pesos moleculares

	MASAJE LINFATICO	STEP 01	EXFOLIACION	STEP 02	INFUSION	STEP 03	BOOSTER INFUSION	STEP 04
 Pieza de mano	TripleJet		TripleJet		TripleJet o SingleJet Narrow		TripleJet o SingleJet Narrow	
 Distancia de la piel	4-7 cm		1 cm		0.5-0.8 cm		0.5-0.8 cm	
 Angulo pieza de mano	90°		90°		90°		90°	
 Tiempo	10-15 min		5-7 min		5-7 min		5-7 min	
 Usar	~18ml de JetCareHydro		~5ml de Renewal CareGlycolic Acid 16%		~5ml de Anti-Aging Care Wide Range Hyaluronic Acid		~3ml de JetCare Boost: Tight	
 Comentarios			Dejar actuar sobre la piel de 5 a 8 minutos. Luego, lavar con 8 ml de JetCare Hydro. Pieza de mano TripleJet a 45-60°.					

Guía de Tratamiento. 4

Indicaciones: Anti-Aging
Pérdida de firmeza y arrugas Cuperosis & Piel sensible
Despigmentante Acne

Mandelico & Salicilico + Acido Hialuronico con diferentes pesos moleculares

	MASAJE LINFATICO	STEP 01	EXFOLIACION	STEP 02	INFUSION	STEP 03	BOOSTER INFUSION	STEP 04
 Pieza de mano	TripleJet		TripleJet		TripleJet o SingleJet Narrow		TripleJet or SingleJet Narrow	
 Distancia de la piel	4-7 cm		1 cm		0.5-0.8 cm		0.5-0.8 cm	
 ngulo pieza de mano	90°		90°		90°		90°	
 Tiempo	10-15 min		5-7 min		5-7 min		5-7 min	
 Usar	~18ml de JetCareHydro		~5ml de Renewal CareMandelic & Salicylic		~5ml de Anti-Aging Care Wide Range Hyaluronic Acid		~3ml de JetCare Boost: Tight/ Regenerate/Glow	
 Comentarios			Lavar con ~8 ml de JetCareHydro . Pieza de mano Triple Jet a 45° - 60°				Según los tratamientos según las características de la piel	

Acido Glicolico 5% +Complejo Peptido

	MASAJE LINFATICO	STEP 01	EXFOLIACION	STEP 02	INFUSION	STEP 03	BOOSTER INFUSION	STEP 04
 Pieza de mano	TripleJet		TripleJet		TripleJet o SingleJet Narrow		TripleJet o SingleJet Narrow	
 Distancia de la piel	4-7 cm		1 cm		0.5-0.8 cm		0.5-0.8 cm	
 Angulo pieza de mano	90°		90°		90°		90°	
 Tiempo	10-15 mins		5-7 mins		5-7 mins		5-7 mins	
 Usar	~18ml de JetCareHydro		~5ml de Renewal CareGlycolic Acid 5%		~5ml de Anti-AgingCare PeptideComplex		~3ml de JetCare Boost: Regenerate/ Glow	
 Comentarios			Dejar actuar sobre la piel de 5 a 8 minutos. Luego, lavar con 8 ml de JetCare Hydro. Pieza de mano TripleJet a 45-60				Según los tratamientos según las características de la piel	

Acido Glicolico 10% +Complejo Peptido

	MASAJE LINFATICO	STEP 01	EXFOLIACION	STEP 02	INFUSION	STEP 03	BOOSTER INFUSION	STEP 04
 Pieza de mano	TripleJet		TripleJet		TripleJet o SingleJet Narrow		TripleJet o SingleJet Narrow	
 Distancia de la piel	4-7 cm		1 cm		0.5-0.8 cm		0.5-0.8 cm	
 Angulo pieza de mano	90°		90°		90°		90°	
 Tiempo	10-15 mins		5-7 mins		5-7 mins		5-7 mins	
 Usar	~18ml de JetCareHydro		~5ml de Renewal CareGlycolic Acid 10%		~5ml de Anti-AgingCare PeptideComplex		~3ml de JetCare Boost: Regenerate/ Glow	
 Comentarios			Dejar actuar sobre la piel de 5 a 8 minutos. Luego, lavar con 8 ml de JetCare Hydro. Pieza de mano TripleJet a 45-60				Según los tratamientos según las características de la piel	

Acido Glicolico 16 % +Complejo Peptido

	MASAJE LINFATICO	STEP 01	EXFOLIACION	STEP 02	INFUSION	STEP 03	BOOSTER INFUSION	STEP 04
 Pieza de mano	TripleJet		TripleJet		TripleJet o SingleJet Narrow		TripleJet o SingleJet Narrow	
 Distancia de la piel	4-7 cm		1 cm		0.5-0.8 cm		0.5-0.8 cm	
 Angulo pieza de mano	90°		90°		90°		90°	
 Tiempo	10-15 mins		5-7 mins		5-7 mins		5-7 mins	
 Usar	~18ml de JetCareHydro		~5ml de Renewal CareGlycolic Acid 16%		~5ml de Anti-AgingCare PeptideComplex		~3ml de JetCare Boost: Regenerate	
 Comentarios			Dejar actuar sobre la piel de 5 a 8 minutos. Luego, lavar con 8 ml de JetCare Hydro. Pieza de mano TripleJet a 45-60					

Mandelico & Salicilico + Complejo Peptido

	MASAJE LINFATICO	STEP 01	EXFOLIACION	STEP 02	INFUSION	STEP 03	BOOSTER INFUSION	STEP 04
 Pieza de mano	TripleJet		TripleJet		TripleJet o SingleJet Narrow		TripleJet o SingleJet Narrow	
 Distancia de la piel	4-7 cm		1 cm		0.5-0.8 cm		0.5-0.8 cm	
 Angulo pieza de mano	90°		90°		90°		90°	
 Tiempo	10-15 mins		5-7 mins		5-7 mins		5-7 mins	
 Usar	~18ml de JetCareHydro		~5ml de Renewal CareMandelic & Salicylic		~5ml de Anti-AgingCare PeptideComplex		~3ml de JetCare Boost: Regenerate/ Glow/ Hydrate	
 Comentarios			Dejar actuar sobre la piel de 5 a 8 minutos. Luego, lavar con 8 ml de JetCare Hydro. Pieza de mano TripleJet a 45-60				Según los tratamientos según las características de la piel	

Guía de Tratamiento. 9

Indicaciones Anti-Aging
luminosidad & Pigmentacion

Post-Acne
Cuperosis y piel sensible

Acido Glicolico 5% + Hamamelis y péptidos

	MASAJE LINFATICO	STEP 01	EXFOLIACION	STEP 02	INFUSION	STEP 03	BOOSTER INFUSION	STEP 04
 Pieza de mano	TripleJet		TripleJet		TripleJet o SingleJet Narrow		TripleJet o SingleJet Narrow	
 Distancia de la piel	4-7 cm		1 cm		0.5-0.8 cm		0.5-0.8 cm	
 Angulo pieza de mano	90°		90°		90°		90°	
 Tiempo	10-15 mins		5-7 mins		5-7 mins		5-7 mins	
 Usar	~18ml de JetCareHydro		~5ml de Renewal CareGlycolic Acid 5%		~5ml de Anti-Aging Care Witch Hazel & Peptides		~3ml de JetCare Boost: Regenerate/ Glow/Hydrate	
 Comentarios			Dejar actuar sobre la piel de 5 a 8 minutos. Luego, lavar con 8 ml de JetCare Hydro. Pieza de mano TripleJet a 45-60				Según los tratamientos según las características de la piel	

Guía de Tratamiento. 10

Indicaciones: Luminosidad & Pigmentacion

Perdida de tono y arrugas

Acido Glicolico 10% +Hamamelis y péptidos

	MASAJE LINFATICO	STEP 01	EXFOLIACION	STEP 02	INFUSION	STEP 03	BOOSTER INFUSION	STEP 04
 Pieza de mano	TripleJet		TripleJet		TripleJet o SingleJet Narrow		TripleJet o SingleJet Narrow	
 Distancia de la piel	4-7 cm		1 cm		0.5-0.8 cm		0.5-0.8 cm	
 Angulo pieza de mano	90°		90°		90°		90°	
 Tiempo	10-15 mins		5-7 mins		5-7 mins		5-7 mins	
 Usar	~18ml de JetCareHydro		~5ml de Renewal CareGlycolic Acid 10%		~5ml de Anti-Aging Care Witch Hazel & Peptides		~3ml de JetCare Boost: Regenerate/ Glow/Hydrate	
 Comentarios			Dejar actuar sobre la piel de 5 a 8 minutos. Luego, lavar con 8 ml de JetCare Hydro. Pieza de mano TripleJet a 45-60				Según los tratamientos según las características de la piel	

Guía de Tratamiento. 11

Indicaciones: Perdida de tono y arrugas

Cuperosis & Piel sensible

Acido Glicolico 16% +Hamamelis y péptidos

	MASAJE LINFATICO	STEP 01	EXFOLIACION	STEP 02	INFUSION	STEP 03	BOOSTER INFUSION	STEP 04
 Pieza de mano	TripleJet		TripleJet		TripleJet o SingleJet Narrow		TripleJet o SingleJet Narrow	
 Distancia de la piel	4-7 cm		1 cm		0.5-0.8 cm		0.5-0.8 cm	
 Angulo pieza de mano	90°		90°		90°		90°	
 Tiempo	10-15 mins		5-7 mins		5-7 mins		5-7 mins	
 Usar	~18ml de JetCareHydro		~5ml de Renewal CareGlycolic Acid 16%		~5ml de Anti-Aging Care Witch Hazel & Peptides		~3ml de JetCareBoost: Glow / Hydrate	
 Comentarios			Dejar actuar sobre la piel de 5 a 8 minutos. Luego, lavar con 8 ml de JetCare Hydro. Pieza de mano TripleJet a 45-60				Según los tratamientos según las características de la piel	

Guía de Tratamiento. 12

Indicaciones:Perdida de tono y arrugas

Post-Acne

Mandelico & Salicilico +Hamamelis y péptidos

	MASAJE LINFATICO	STEP 01	EXFOLIACION	STEP 02	INFUSION	STEP 03	BOOSTER INFUSION	STEP 04
 Pieza de mano	TripleJet		TripleJet		TripleJet o SingleJet Narrow		TripleJet o SingleJet Narrow	
 Distancia de la piel	4-7 cm		1 cm		0.5-0.8 cm		0.5-0.8 cm	
 Angulo pieza de mano	90°		90°		90°		90°	
 Tiempo	10-15 mins		5-7 mins		5-7 mins		5-7 mins	
 Usar	~18ml de JetCareHydro		~5ml de Renewal CareMandelic & Salicylic		~5ml de Anti-Aging Care Witch Hazel & Peptides		~3ml de JetCareBoost: Hydrate	
 Comentarios			Lavar con ~8 ml de JetCareHydro . Pieza de mano Triple Jet a 45° - 60°					

Guía de Tratamiento. 13

Indicaciones

Anti-Aging
Post-Acne

Cuperosis & Piel sensible
Despigmentante

Acido Glicolico 5% + Iluminador

	MASAJE LINFATICO	STEP 01	EXFOLIACION	STEP 02	INFUSION	STEP 03	BOOSTER INFUSION	STEP 04
 Pieza de mano	TripleJet		TripleJet		TripleJet o SingleJet Narrow		TripleJet o SingleJet Narrow	
 Distancia de la piel	4-7 cm		1 cm		0.5-0.8 cm		0.5-0.8 cm	
 Angulo pieza de mano	90°		90°		90°		90°	
 Tiempo	10-15 mins		5-7 mins		5-7 mins		5-7 mins	
 Usar	~18ml de JetCareHydro		~5ml de Renewal CareGlycolic Acid 5%		~5ml de SelectiveCare Lightening		~3ml de JetCare Boost: Regenerate / Glow / Hydrate	
 Comentarios			Dejar actuar sobre la piel de 5 a 8 minutos. Luego, lavar con 8 ml de JetCare Hydro. Pieza de mano TripleJet a 45-60°				Según los tratamientos según las características de la piel	

Guía de Tratamiento. 14

Indicaciones

Anti-Aging

Acne
Post-Acne

Cuperosis & Piel sensible
Despigmentante

Acido Glicolico 10% + Iluminador

	MASAJE LINFATICO	STEP 01	EXFOLIACION	STEP 02	INFUSION	STEP 03	BOOSTER INFUSION	STEP 04
 Pieza de mano	TripleJet		TripleJet		TripleJet or SingleJet Narrow		TripleJet or SingleJet Narrow	
 Distancia de la piel	4-7 cm		1 cm		0.5-0.8 cm		0.5-0.8 cm	
 Angulo pieza de mano	90°		90°		90°		90°	
 Tiempo	10-15 mins		5-7 mins		5-7 mins		5-7 mins	
 Usar	~18ml de JetCareHydro		~5ml de Renewal CareGlycolic Acid 10%		~5ml de SelectiveCare Lightening		~3ml de JetCare Boost: Regenerate / Glow / Hydrate	
 Comentarios			Dejar actuar sobre la piel de 5 a 8 minutos. Luego, lavar con 8 ml de JetCare Hydro. Pieza de mano TripleJet a 45-60°				Según los tratamientos según las características de la piel	

Guía de Tratamiento. 15

Indicaciones

Anti-Aging
luminosidad y pigmentación

Acido Glicolico 16% + Iluminador

	MASAJE LINFATICO	STEP 01	EXFOLIACION	STEP 02	INFUSION	STEP 03	BOOSTER INFUSION	STEP 04
 Pieza de mano	TripleJet		TripleJet		TripleJet o SingleJet Narrow		TripleJet o SingleJet Narrow	
 Distancia de la piel	4-7 cm		1 cm		0.5-0.8 cm		0.5-0.8 cm	
 Angulo pieza de mano	90°		90°		90°		90°	
 Tiempo	10-15 mins		5-7 mins		5-7 mins		5-7 mins	
 Usar	~18ml de JetCareHydro		~5ml de Renewal CareGlycolic Acid 16%		~5ml de SelectiveCare Lightening		~3ml de JetCare Boost: Regenerate / Hydrate	
 Comentarios			Dejar actuar sobre la piel de 5 a 8 minutos. Luego, lavar con 8 ml de JetCare Hydro. Pieza de mano TripleJet a 45-60°				Según los tratamientos según las características de la piel	

Guía de Tratamiento. 16

Indicaciones

Anti-Aging
Acne

Cuperosis & Piel sensible
Despigmentante

Mandelico & Salicilico + Iluminador

	MASAJE LINFATICO	STEP 01	EXFOLIACION	STEP 02	INFUSION	STEP 03	BOOSTER INFUSION	STEP 04
 Pieza de mano	TripleJet		TripleJet		TripleJet or SingleJet Narrow		TripleJet or SingleJet Narrow	
 Distancia de la piel	4-7 cm		1 cm		0.5-0.8 cm		0.5-0.8 cm	
 Angulo pieza de mano	90°		90°		90°		90°	
 Tiempo	10-15 mins		5-7 mins		5-7 mins		5-7 mins	
 Usar	~18ml de JetCareHydro		~5ml de Renewal CareMandelic & Salicylic		~5ml de SelectiveCare Lightening		~3ml de JetCare Boost: Regenerate / Glow / Hydrate	
 Comentarios			Lavar con ~8 ml de JetCareHydro . Pieza de mano Triple Jet a 45°- 60°				Según los tratamientos según las características de la piel	

Acido Glicolico 5% + Argireline® Complex

	MASAJE LINFATICO	STEP 01	EXFOLIACION	STEP 02	INFUSION	STEP 03	BOOSTER INFUSION	STEP 04
Pieza de mano	TripleJet		TripleJet		TripleJet o SingleJet Narrow		TripleJet o SingleJet Narrow	
Distancia de la piel	4-7 cm		1 cm		0.5-0.8 cm		0.5-0.8 cm	
Angulo pieza de mano	90°		90°		90°		90°	
Tiempo	10-15 min		5-7 min		5-7 min		5-7 min	
Usar	~18ml de JetCareHydro		~5ml de Renewal CareGlycolic Acid 5%		~5ml de SelectiveCare Argireline®Complex		~3ml de Anti-AgingCare Wide RangeHyaluronic Acid	
Comentarios			Dejar actuar sobre la piel de 5 a 8 minutos. Luego, lavar con 8 ml de JetCare Hydro. Pieza de mano TripleJet a 45-60					

Acido Glicolico 10% + Argireline® Complex

	MASAJE LINFATICO	STEP 01	EXFOLIACION	STEP 02	INFUSION	STEP 03	BOOSTER INFUSION	STEP 04
Pieza de mano	TripleJet		TripleJet		TripleJet o SingleJet Narrow		TripleJet or SingleJet Narrow	
Distancia de la piel	4-7 cm		1 cm		0.5-0.8 cm		0.5-0.8 cm	
Angulo pieza de mano	90°		90°		90°		90°	
Tiempo	10-15min		5-7 min		5-7 min		5-7 min	
Usar	~18ml de JetCareHydro		~5ml de Renewal CareGlycolic Acid 10%		~5ml de SelectiveCare Argireline® Complex		~3ml de Anti-Aging Care Wide Range Hyaluronic Acid	
Comentarios			Dejar actuar sobre la piel de 5 a 8 minutos. Luego, lavar con 8 ml de JetCare Hydro. Pieza de mano TripleJet a 45-60					

Acido Glicolico 16% + Argireline® Complex

	MASAJE LINFATICO	STEP 01	EXFOLIACION	STEP 02	INFUSION	STEP 03	BOOSTER INFUSION	STEP 04
Pieza de mano	TripleJet		TripleJet		TripleJet o SingleJet Narrow		TripleJet o SingleJet Narrow	
Distancia de la piel	4-7 cm		1 cm		0.5-0.8 cm		0.5-0.8 cm	
Angulo pieza de mano	90°		90°		90°		90°	
Tiempo	10-15 min		5-7 min		5-7 min		5-7 min	
Usar	~18ml de JetCareHydro		~5ml de Renewal CareGlycolic Acid 16%		~5ml,de SelectiveCare Argireline® Complex		~3ml de Anti-Aging Care Wide Range Hyaluronic Acid	
Comentarios			Dejar actuar sobre la piel de 5 a 8 minutos. Luego, lavar con 8 ml de JetCare Hydro. Pieza de mano TripleJet a 45-60					

Mandelico & Salicilico + Argireline® Complex

	MASAJE LINFATICO	STEP 01	EXFOLIACION	STEP 02	INFUSION	STEP 03	BOOSTER INFUSION	STEP 04
Pieza de mano	TripleJet		TripleJet		TripleJet o SingleJet Narrow		TripleJet o SingleJet Narrow	
Distancia de la piel	4-7 cm		1 cm		0.5-0.8 cm		0.5-0.8 cm	
Angulo pieza de mano	90°		90°		90°		90°	
Tiempo	10-15 min		5-7 min		5-7 min		5-7 min	
Usar	~18ml de JetCareHydro		~5ml de Renewal Care Mandelic & Salicylic		~5ml de SelectiveCare Argireline® Complex		~3ml de Anti-Aging Care Wide Range Hyaluronic Acid	
Comentarios			Lavar con ~8 ml de JetCareHydro . Pieza de mano Triple Jet a 45° - 60°					

*Argireline® is a trademark of Lipotec S.A. or its affiliates

Acido Glicolico 5% + Soothing

	MASAJE LINFATICO	STEP 01	EXFOLIACION	STEP 02	INFUSION	STEP 03	BOOSTER INFUSION	STEP 04
 Pieza de mano	TripleJet		TripleJet		TripleJet o SingleJet Narrow		TripleJet o SingleJet Narrow	
 Distancia de la piel	4-7 cm		1 cm		0.5-0.8 cm		0.5-0.8 cm	
 Angulo pieza de mano	90°		90°		90°		90°	
 Tiempo	10-15 mins		5-7 mins		5-7 mins		5-7 mins	
 Usar	~18ml de JetCareHydro		~5ml de Renewal CareGlycolic Acid 5%		~5ml de SelectiveCare Soothing		~3ml de JetCare Boost: Regenerate / Glow / Hydrate / Tight	
 Comentarios			Dejar actuar sobre la piel de 5 a 8 minutos. Luego, lavar con 8 ml de JetCare Hydro. Pieza de mano TripleJet a 45-60				Según los tratamientos según las características de la piel	

Acido Glicolico 10% + Soothing

	MASAJE LINFATICO	STEP 01	EXFOLIACION	STEP 02	INFUSION	STEP 03	BOOSTER INFUSION	STEP 04
 Pieza de mano	TripleJet		TripleJet		TripleJet o SingleJet Narrow		TripleJet o SingleJet Narrow	
 Distancia de la piel	4-7 cm		1 cm		0.5-0.8 cm		0.5-0.8 cm	
 Angulo pieza de mano	90°		90°		90°		90°	
 Tiempo	10-15 min		5-7 min		5-7 min		5-7 min	
 Usar	~18ml de JetCareHydro		~5ml de Renewal CareGlycolic Acid 10%		~5ml de SelectiveCare Soothing		~3ml de JetCare Boost: Regenerate / Glow / Tight	
 Comentarios			Dejar actuar sobre la piel de 5 a 8 minutos. Luego, lavar con 8 ml de JetCare Hydro. Pieza de mano TripleJet a 45-60				Según los tratamientos según las características de la piel	

Acido Glicolico 16% + Soothing

	MASAJE LINFATICO	STEP 01	EXFOLIACION	STEP 02	INFUSION	STEP 03	BOOSTER INFUSION	STEP 04
 Pieza de mano	TripleJet		TripleJet		TripleJet o SingleJet Narrow		TripleJet o SingleJet Narrow	
 Distancia de la piel	4-7 cm		1 cm		0.5-0.8 cm		0.5-0.8 cm	
 Angulo pieza de mano	90°		90°		90°		90°	
 Tiempo	10-15 mins		5-7 mins		5-7 mins		5-7 mins	
 Usar	~18ml de JetCareHydro		~5ml de Renewal CareGlycolic Acid 16%		~5ml de SelectiveCare Soothing		~3ml de JetCareBoost: Tight	
 Comentarios			Dejar actuar sobre la piel de 5 a 8 minutos. Luego, lavar con 8 ml de JetCare Hydro. Pieza de mano TripleJet a 45-60					

Mandelico & Salicilico + Soothing

	MASAJE LINFATICO	STEP 01	EXFOLIACION	STEP 02	INFUSION	STEP 03	BOOSTER INFUSION	STEP 04
 Pieza de mano	TripleJet		TripleJet		TripleJet o SingleJet Narrow		TripleJet o SingleJet Narrow	
 Distancia de la piel	4-7 cm		1 cm		0.5-0.8 cm		0.5-0.8 cm	
 Angulo pieza de mano	90°		90°		90°		90°	
 Tiempo	10-15 min		5-7 min		5-7 min		5-7 min	
 Usar	~18ml de JetCareHydro		~5ml de Renewal CareMandelic & Salicylic		~5ml de SelectiveCare Soothing		~3ml de JetCare Boost: Regenerate / Glow	
 Comentarios			Lavar con ~8 ml de JetCareHydro . Pieza de mano Triple Jet a 45° - 60°				Según los tratamientos según las características de la piel	

Acido Glicolico 5% + Clear

	MASAJE LINFATICO	STEP 01	EXFOLIACION	STEP 02	INFUSION	STEP 03	BOOSTER INFUSION	STEP 04
 Pieza de mano	TripleJet		TripleJet		TripleJet o SingleJet Narrow		TripleJet o SingleJet Narrow	
 Distancia de la piel	4-7 cm		1 cm		0.5-0.8 cm		0.5-0.8 cm	
 Angulo pieza de mano	90°		90°		90°		90°	
 Tiempo	10-15 min		5-7 min		5-7 min		5-7 min	
 Usar	~18ml de JetCareHydro		~5ml de Renewal CareGlycolic Acid 5%		~5ml de SelectiveCare Clear		~3ml de JetCare Boost:Glow / Hydrate	
 Comentarios			Dejar actuar sobre la piel de 5 a 8 minutos. Luego, lavar con 8 ml de JetCare Hydro. Pieza de mano TripleJet a 45-60				Según los tratamientos según las características de la piel	

Acido Glicolico 10% + Clear

	MASAJE LINFATICO	STEP 01	EXFOLIACION	STEP 02	INFUSION	STEP 03	BOOSTER INFUSION	STEP 04
 Pieza de mano	TripleJet		TripleJet		TripleJet o SingleJet Narrow		TripleJet o SingleJet Narrow	
 Distancia de la piel	4-7 cm		1 cm		0.5-0.8 cm		0.5-0.8 cm	
 Angulo pieza de mano	90°		90°		90°		90°	
 Tiempo	10-15 min		5-7 min		5-7 min		5-7 min	
 Usar	~18ml de JetCareHydro		~5ml de Renewal CareGlycolic Acid 10%		~5ml de SelectiveCare Clear		~3ml de JetCareBoost: Glow /Hydrate	
 Comentarios			Dejar actuar sobre la piel de 5 a 8 minutos. Luego, lavar con 8 ml de JetCare Hydro. Pieza de mano TripleJet a 45-60				Según los tratamientos según las características de la piel	

Acido Glicolico 16% + Clear

	MASAJE LINFATICO	STEP 01	EXFOLIACION	STEP 02	INFUSION	STEP 03	BOOSTER INFUSION	STEP 04
 Pieza de mano	TripleJet		TripleJet		TripleJet o SingleJet Narrow		TripleJet o SingleJet Narrow	
 Distancia de la piel	4-7 cm		1 cm		0.5-0.8 cm		0.5-0.8 cm	
 Angulo pieza de mano	90°		90°		90°		90°	
 Tiempo	10-15 min		5-7 min		5-7 min		5-7 min	
 Usar	~18ml de JetCareHydro		~5ml de Renewal CareGlycolic Acid 16%		~5ml de SelectiveCare Clear		~3ml de JetCareBoost: Glow /Hydrate	
 Comentarios			Dejar actuar sobre la piel de 5 a 8 minutos. Luego, lavar con 8 ml de JetCare Hydro. Pieza de mano TripleJet a 45-60				Según los tratamientos según las características de la piel	

Mandelico & Salicilico + Clear

	MASAJE LINFATICO	STEP 01	EXFOLIACION	STEP 02	INFUSION	STEP 03	BOOSTER INFUSION	STEP 04
 Pieza de mano	TripleJet		TripleJet		TripleJet o SingleJet Narrow		TripleJet o SingleJet Narrow	
 Distancia de la piel	4-7 cm		1 cm		0.5-0.8 cm		0.5-0.8 cm	
 Angulo pieza de mano	90°		90°		90°		90°	
 Tiempo	10-15 min		5-7 min		5-7 min		5-7 min	
 Usar	~18ml de JetCareHydro		~5ml de Renewal CareMandelic & Salicylic		~5ml de SelectiveCare Clear		~3ml de JetCare Boost: Regenerate / Hydrate	
 Comentarios			Lavar con ~8 ml de JetCareHydro . Pieza de mano Triple Jet a 45°- 60°				Según los tratamientos según las características de la piel	

Guía de Tratamiento. 29

Indicaciones Anti-Aging
Pérdida de firmeza y arrugas Acne
Post-Acne Cuperosis & Piel sensible
Despigmentante

Acido Glicolico 5% + Growth Factor

	MASAJE LINFATICO	STEP 01	EXFOLIACION	STEP 02	INFUSION	STEP 03	BOOSTER INFUSION	STEP 04
Pieza de mano	TripleJet		TripleJet		TripleJet o SingleJet Narrow		TripleJet o SingleJet Narrow	
Distancia de la piel	4-7 cm		1 cm		0.5-0.8 cm		0.5-0.8 cm	
Angulo pieza de mano	90°		90°		90°		90°	
Tiempo	10-15 min		5-7 min		5-7 min		5-7 min	
Usar	~18ml de JetCareHydro		~5ml de Renewal CareGlycolic Acid 5%		~5ml de Selective Care Growth Factor		~3ml de JetCare Boost: Regenerate / Glow / Hydrate / Tight	
Comentarios			Dejar actuar sobre la piel de 5 a 8 minutos. Luego, lavar con 8 ml de JetCare Hydro. Pieza de mano TripleJet a 45-60				Según los tratamientos según las características de la piel	

Guía de Tratamiento. 30

Post-Acne Indicaciones Acne

Acido Glicolico 10% + Growth Factor

	MASAJE LINFATICO	STEP 01	EXFOLIACION	STEP 02	INFUSION	STEP 03	BOOSTER INFUSION	STEP 04
Pieza de mano	TripleJet		TripleJet		TripleJet o SingleJet Narrow		TripleJet o SingleJet Narrow	
Distancia de la piel	4-7 cm		1 cm		0.5-0.8 cm		0.5-0.8 cm	
Angulo pieza de mano	90°		90°		90°		90°	
Tiempo	10-15 min		5-7 min		5-7 min		5-7 min	
Usar	~18ml de JetCareHydro		~5ml de Renewal CareGlycolic Acid 10%		~5ml de Selective Care Growth Factor		~3ml de JetCare Boost: Regenerate / Tight	
			Dejar actuar sobre la piel de 5 a 8 minutos. Luego, lavar con 8 ml de JetCare Hydro. Pieza de mano TripleJet a 45-60				Según los tratamientos según las características de la piel	

Guía de Tratamiento. 31

pigmentación Indicaciones Acne Iluminación y

Acido Glicolico 16% + Growth Factor

	MASAJE LINFATICO	STEP 01	EXFOLIACION	STEP 02	INFUSION	STEP 03	BOOSTER INFUSION	STEP 04
Pieza de mano	TripleJet		TripleJet		TripleJet o SingleJet Narrow		TripleJet o SingleJet Narrow	
Distancia de la piel	4-7 cm		1 cm		0.5-0.8 cm		0.5-0.8 cm	
Angulo pieza de mano	90°		90°		90°		90°	
Tiempo	10-15 min		5-7 min		5-7 min		5-7 min	
Usar	~18ml de JetCareHydro		~5ml de Renewal CareGlycolic Acid 16%		~5ml de Selective Care Growth Factor		~3ml de JetCare Boost: Hydrate / Tight	
Comentarios			Dejar actuar sobre la piel de 5 a 8 minutos. Luego, lavar con 8 ml de JetCare Hydro. Pieza de mano TripleJet a 45-60				Según los tratamientos según las características de la piel	

Guía de Tratamiento. 32

Indicaciones Acne

Mandelico & Salicilico + Growth Factor

	MASAJE LINFATICO	STEP 01	EXFOLIACION	STEP 02	INFUSION	STEP 03	BOOSTER INFUSION	STEP 04
Pieza de mano	TripleJet		TripleJet		TripleJet o SingleJet Narrow		TripleJet o SingleJet Narrow	
Distancia de la piel	4-7 cm		1 cm		0.5-0.8 cm		0.5-0.8 cm	
ngulo pieza de mano	90°		90°		90°		90°	
Tiempo	10-15 min		5-7 min		5-7 min		5-7 min	
Usar	~18ml de JetCareHydro		~5ml de Renewal CareMandelic & Salicylic		~5ml de Selective Care Growth Factor		~3ml de JetCare Boost:Tight	
Comentarios			Lavar con ~8 ml de JetCareHydro . Pieza de mano Triple Jet a 45° - 60°					




CUERO CABELLUDO Y CABELLO

Recomendación de ciclo de tratamiento



10 Tratamientos

Uno a la semana durante 10 semanas

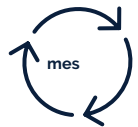

Despues de 10 tratamientos:

Mantenimientos cada 3-4 semanas

Características del cuero cabelludo y cabello

Cuero cabelludo sensible y con picazón

La principal causa de picazón en el cuero cabelludo es la inflamación y la sensibilidad. Esto puede deberse a factores ambientales, como la contaminación o la exposición al sol. El picor en el cuero cabelludo también puede deberse a problemas emocionales como el estrés y la ansiedad. En algunos casos, el escozor se debe a la acumulación de piel seca o al uso de productos agresivos que irritan la delicada piel del cuero cabelludo.

Cuero cabelludo seco

La sequedad del cuero cabelludo a veces tiene causas genéticas, y quienes la padecen también suelen ser propensos a otras afecciones cutáneas, como el eccema. En otros casos, la sequedad del cuero cabelludo se debe a factores externos o emocionales, como la calefacción o el estrés. La sequedad del cuero cabelludo puede causar una sensación de tirantez y también puede ir acompañada de descamación indeseada.

Cuero cabelludo graso

La piel y el cuero cabelludo tienen una película hidrolipídica compuesta de sebo, sudor e hidratación que forma una barrera natural que protege la piel de los agentes externos. En las personas con tendencia a la piel grasa, la película hidrolipídica puede sobrepasar su capacidad, causando grasa en el cuero cabelludo. La piel grasa puede ser consecuencia del estrés, los cambios hormonales, la exposición a la contaminación o a productos agresivos. Un cuero cabelludo graso puede provocar que las raíces del cabello se engrasen rápidamente, lo que puede causar acné.

Cuero cabelludo escamoso

La descamación del cuero cabelludo es muy visible, ya que produce pequeñas escamas secas que se depositan en él o caen sobre la ropa. Las causas de la descamación son diversas. Puede presentarse en piel seca, grasa e irritada, o piel sensible. La descamación también puede ser consecuencia de la dermatitis de contacto, causada por la sensibilidad a los productos utilizados en el cabello y el cuero cabelludo.

Scalp and Hair Treatment Guidelines

TIPO DE CUERO CABELLUDO	1 Tratamiento	2 Tratamiento	3 Tratamiento	4 Tratamiento	5 Tratamiento
 Picazón, sensibilidad	Guía de tratamiento 33 con JetCare Hydro con Boost Regenerate	Guía de tratamiento 34 con JetCare Hydro con Scalp & Hair	Guía de tratamiento 34 con JetCare Hydro con Scalp & Hair	Guía de tratamiento 34 con JetCare Hydro con Scalp & Hair	Guía de tratamiento 35 con JetCare Hydro con Boost Hydrate
Seco	Guía de tratamiento 33 con JetCare Hydro con Boost Regenerate	Guía de tratamiento 34 con JetCare Hydro con Scalp & Hair	Guía de tratamiento 34 con JetCare Hydro con Scalp & Hair	Guía de tratamiento 34 con JetCare Hydro con Scalp & Hair	Guía de tratamiento 37 con Glycolic Acid 5% con Boost Hydrate
Graso	Guía de tratamiento 37 con Glycolic Acid 5% con Boost Hydrate	Guía de tratamiento 39 con Glycolic Acid 5% con Scalp & Hair	Guía de tratamiento 34 con JetCare Hydro con Scalp & Hair	Guía de tratamiento 34 con JetCare Hydro con Scalp & Hair	Guía de tratamiento 40 con Glycolic Acid 10% con Boost Hydrate
Descamación	Guía de tratamiento 37 con Glycolic Acid 5% con Boost Hydrate	Guía de tratamiento 33 con JetCare Hydro con Boost Regenerate	Guía de tratamiento 39 con Glycolic Acid 5% con Scalp & Hair	Guía de tratamiento 34 con JetCare Hydro con Scalp & Hair	Guía de tratamiento 40 con Glycolic Acid 10% con Boost Hydrate

6 Tratamiento	7 Tratamiento	8 Tratamiento	9 Tratamiento	10 Tratamiento	Maintenance Treatments (every 3-4 weeks)
Guía de tratamiento 34 con JetCare Hydro con Scalp & Hair	Guía de tratamiento 34 con JetCare Hydro con Scalp & Hair	Guía de tratamiento 36 con JetCare Hydro con Boost Tight	Guía de tratamiento 34 con JetCare Hydro con Scalp & Hair	Guía de tratamiento 34 con JetCare Hydro con Scalp & Hair	Guía de tratamiento 34 con JetCare Hydro con Scalp and Hair
Guía de tratamiento 34 con JetCare Hydro con Scalp & Hair	Guía de tratamiento 34 con JetCare Hydro con Scalp & Hair	Guía de tratamiento 38 con Glycolic Acid 5% con Boost Hydrate	Guía de tratamiento 34 con JetCare Hydro con Scalp & Hair	Guía de tratamiento 34 con JetCare Hydro con Scalp & Hair	Guía de tratamiento 34 con JetCare Hydro con Scalp and Hair
Guía de tratamiento 34 con JetCare Hydro con Scalp & Hair	Guía de tratamiento 34 con JetCare Hydro con Scalp & Hair	Guía de tratamiento 37 con Glycolic Acid 5% con Boost Hydrate	Guía de tratamiento 39 con Glycolic Acid 5% con Scalp & Hair	Guía de tratamiento 34 con JetCare Hydro con Scalp & Hair	Guía de tratamiento 39 con Glycolic Acid 5% con Scalp and Hair
Guía de tratamiento 34 con JetCare Hydro con Scalp & Hair	Guía de tratamiento 34 con JetCare Hydro con Scalp & Hair	Guía de tratamiento 41 con Glycolic Acid 5% con Scalp & Hair	Guía de tratamiento 39 con Glycolic Acid 5% con Scalp & Hair	Guía de tratamiento 34 con JetCare Hydro con Scalp & Hair	Guía de tratamiento 39 con Glycolic Acid 5% con Scalp and Hair

GUIA DE TRATAMIENTO No. 33

	MASAJE Y EXFOLIACIÓN	INFUSION
 Pieza de mano	TripleJet	DoubleJet
 Distancia de la piel	10 mm	5-7 mm
 Angulo Pieza de mano	45-90°	90°
 Tiempo	10 min	5-7 min
 Uso	~12ml de JetCare Hydro	~6-7ml de Boost Regenerate

GUIA DE TRATAMIENTO No. 34

	MASAJE Y EXFOLIACIÓN	INFUSION
 Pieza de mano	TripleJet	DoubleJet
 Distancia de la piel	10 mm	5-7 mm
 Angulo Pieza de mano	45-90°	90°
 Tiempo	10 min	5-7 min
 Uso	~12ml de JetCare Hydro	~6-7ml de Selective Care Scalp & Hair

GUIA DE TRATAMIENTO No. 35

	MASAJE Y EXFOLIACIÓN	INFUSION
 Pieza de mano	TripleJet	DoubleJet
 Distancia de la piel	10 mm	5-7 mm
 Angulo Pieza de mano	45-90°	90°
 Tiempo	10 min	5-7 min
 Uso	~12ml de JetCare Hydro	~6-7ml de Boost Hydrate

GUIA DE TRATAMIENTO No. 37

	MASAJE Y EXFOLIACIÓN	INFUSION
 Pieza de mano	TripleJet	DoubleJet
 Distancia de la piel	10 mm	5-7 mm
 Angulo Pieza de mano	45-90°	90°
 Tiempo	10 min	5-7 min
 Uso	~6ml de Glycolic Acid 5%	~6-7ml de Boost Hydrate
 Comentarios	Despues de unos minutos aclarar con 10ml de JetCare Hydro	

GUIA DE TRATAMIENTO No. 36

	MASAJE Y EXFOLIACIÓN	INFUSION
 Pieza de mano	TripleJet	DoubleJet
 Distancia de la piel	10 mm	5-7 mm
 Angulo Pieza de mano	45-90°	90°
 Tiempo	10 min	5-7 min
 Uso	~12ml de JetCare Hydro	~6-7ml de Boost Tight

GUIA DE TRATAMIENTO No. 38

	MASAJE Y EXFOLIACIÓN	INFUSION
 Pieza de mano	TripleJet	DoubleJet
 Distancia de la piel	10 mm	5-7 mm
 Angulo Pieza de mano	45-90°	90°
 Tiempo	10 min	5-7 min
 Uso	~6ml de Glycolic Acid 5%	~6-7ml de Boost Tight
 Comentarios	Despues de unos minutos aclarar con 10ml de JetCare Hydro	

GUIA DE TRATAMIENTO No. 39

	MASAJE Y EXFOLIACIÓN	INFUSION
 Pieza de mano	TripleJet	DoubleJet
 Distancia de la piel	10 mm	5-7 mm
 Angulo Pieza de mano	45-90°	90°
 Tiempo	10 min	5-7 min
 Uso	~6ml de Glycolic Acid 5%	~6-7ml de Selective Care Scalp & Hair
 Comentarios	Despues de unos minutos aclarar con 10ml de JetCare Hydro	

GUIA DE TRATAMIENTO No. 41

	MASAJE Y EXFOLIACIÓN	INFUSION
 Pieza de mano	TripleJet	DoubleJet
 Distancia de la piel	10 mm	5-7 mm
 Angulo Pieza de mano	45-90°	90°
 Tiempo	10 min	5-7 min
 Uso	~6ml de Glycolic Acid 5%,	~6-7ml de Boost Regenerate
 Comentarios	Despues de unos minutos aclarar con 10ml de JetCare Hydro	

GUIA DE TRATAMIENTO No. 40

	MASAJE Y EXFOLIACIÓN	INFUSION
 Pieza de mano	TripleJet	DoubleJet
 Distancia de la piel	10 mm	5-7 mm
 Angulo Pieza de mano	45-90°	90°
 Tiempo	10 min	5-7 min
 Uso	~6ml de Glycolic Acid 10%	~6-7ml de Boost Hydrate
 Comentarios	Despues de unos minutos aclarar con 10ml de JetCare Hydro	

TAVTECH LTD

T: +972.3.536.0515

E: info@jetpeel.com

40 Haatzmaut St.

Yehud, 5630417

Israel

FOLLOW US:



www.jetpeel.com

